

FISSCURE[®]

CE CERTIFIZIERT

EINWEG-MEDIZINPRODUKT ZUR BEHANDLUNG CHRONISCHER ANALFISSUREN

NEU & INNOVATIV



EINFACH | SICHER | WIRKSAM

FISSCURE®

SWISS MADE 



FISSCURE® ist ein Einweg-Medizinprodukt, welches zur präzisen Injektion von Botulinumtoxin in den inneren Analsphinkter entwickelt wurde, zur Behandlung von Analfissuren.

DIE BEHANDLUNG CHRONISCHER ANALFISSUREN BLEIBT EINE HERAUSFORDERUNG

VOR- UND NACHTEILE DER GÄNGIGSTEN BEHANDLUNGSMETHODEN

	Topische Salbe	Botulinumtoxin	Laterale Spinkterotomie
Vorteile Patient	<ul style="list-style-type: none">• Nicht invasiv	<ul style="list-style-type: none">• Einmalige Behandlung• Minimalinvasiver Eingriff• Wirksam	<ul style="list-style-type: none">• Einmalige Behandlung• Sehr hohe Wirksamkeit• Sehr niedrige Rückfallquote
Arzt	<ul style="list-style-type: none">• Erstlinienbehandlung	<ul style="list-style-type: none">• Als Erstlinienbehandlung möglich• Empfohlene Zweitlinienbehandlung• In Verbindung mit Fissurektomie• Keine Compliance-Probleme• Sicher für den Anwender• Einfach, ohne Einarbeitungsaufwand	<ul style="list-style-type: none">• Erstlinientherapie bei Niedrigrisiko-Patienten
Nachteile Patient	<ul style="list-style-type: none">• Anwendung 2-3 Mal täglich über einen Zeitraum von 6-8 Wochen• Nebenwirkungen je nach verwendeter Formulierung• Mäßige Wirksamkeit	<ul style="list-style-type: none">• Während des Eingriffs kann eine Sedierung erforderlich sein• Keine Rückerstattung	<ul style="list-style-type: none">• Invasive Operation• Risiko einer dauerhaften Inkontinenz
Arzt	<ul style="list-style-type: none">• Compliance		

 Injektion mittels FISSCURE®


BOTULINUMTOXIN

BEHANDLUNG

Die Injektion von Botulinumtoxin erzielt ähnliche Ergebnisse wie die Anwendung von Salben und kann Patienten, die eine häufige Salbenanwendung vermeiden möchten, als Erstbehandlung angeboten werden. Die meisten nationalen Leitlinien empfehlen Botulinumtoxin auch als Zweitbehandlung, eventuell in Kombination mit einer Fissurektomie. Denn trotz der hohen Wirksamkeit einer lateralen Sphinkterotomie bestehen Bedenken hinsichtlich einer anhaltenden Inkontinenz im Zusammenhang mit diesem Verfahren.*

FISSCURE® VERWENDEN

FÜR DIE INJEKTION VON BOTULINUMTOXIN

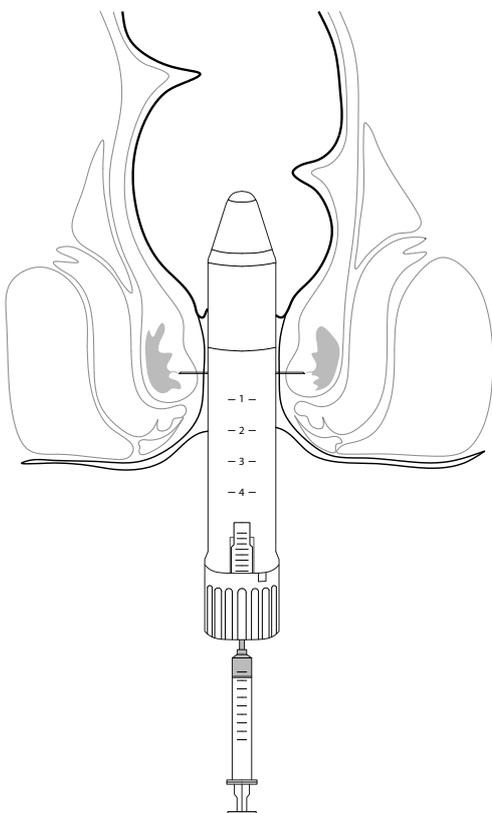

EINFACH

FISSCURE® ist unkompliziert und schnell in der Anwendung und macht die üblicherweise mit der präzisen Injektion von Botulinumtoxin in den inneren Analsphinkter verbundene Einarbeitungszeit überflüssig. Dies ist besonders wichtig angesichts der relativ geringen Häufigkeit von Analfissuren, was bedeutet, dass Gastroenterologen und Proktologen mit einer eher begrenzten Anzahl von Fällen pro Jahr konfrontiert sind.



SICHER

FISSCURE® ist für den Anwender von Natur aus sicher im Verlauf der Anwendung, da während des gesamten Eingriffs kein direkter Kontakt mit den Nadeln entsteht.




WIRKSAM

FISSCURE® gewährleistet eine präzise und zuverlässige Verabreichung in alle vier Quadranten des inneren Analsphinkters. Es wird davon ausgegangen, dass dies zu konstant hohen Heilungsraten führen wird.


*REF: D. Stewart et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Anal Fissures. Dis. Colon Rectum. 2017, Vol 60, pp 7-14; J. Lund et al. An evidence-based treatment algorithm for anal fissure. Tech. Coloproctol. 2006, Vol 10, pp 177-180; A. Arroyo et al. Treatment Algorithm fo Anal Fissure. Consensus Document of the Spanish Association of Coloproctology and the Coloproctology Division of the Spanish Association of Sureons. Cirugia Espanola. 2018, Vol 96, pp 206.267; K. Cross et al. Management of Anal Fissure: ACPGBI Position statement. Color. Dis. 2008; A. Wald et al. ACG Clinical Guideline: Management of Benign Anorectal Disorders. Am. J. Gastroenterol. 2014, Vol 109, pp 1141-1157; T. Higuero Update on ther management of anal fissure. J. Visc. Surg. 2015, Vol 152, pp S37-S43; D. Altomare et al. The management of patients with primary chronic anal fissure: a position paper. Tech. Coloproctol. 2011, Vol 15, pp 135-14. M. Trpis et al. Fissurectomy combined with botulinum toxin A: a review of short- and long-term efficacy of this treatment strategy for chronic anal fissure: a consecutive proposal of treatment algorithm for chronic anal fissure. Colopretology. 2020, Vol 42, pp 400-408; I. Iesalniaks et al. Treatment of chronic anal fissure using fissurectomy combined with botulinum toxin. Coloprcctology. 2020, Vol 42, pp 464-468.

VERFAHREN SCHNELL UND EINFACH DURCHZUFÜHREN


Besuchen Sie unsere Website oder unseren YouTube-Kanal **Doc-Invent SA**, um eine Live-Demonstration der Anwendung von **FISSCURE®** zu sehen.

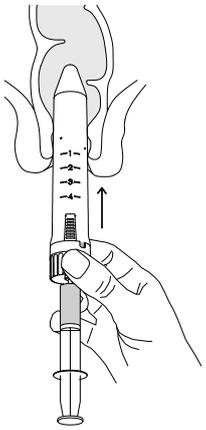


SCHRITT 1

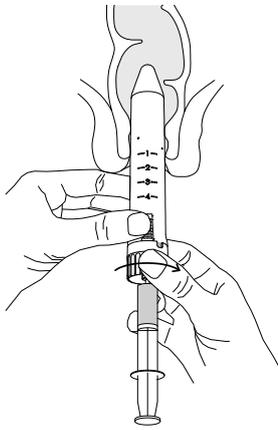


SCHRITT 2

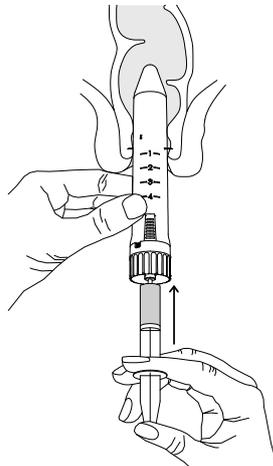

SCHRITT 3

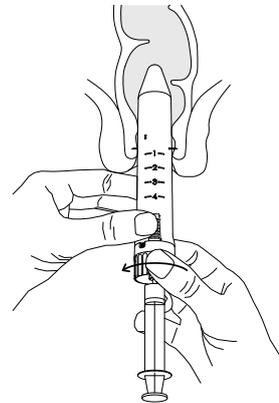

SCHRITT 4

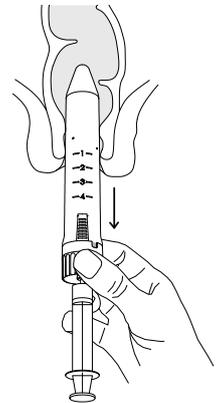

SCHRITT 5

SCHRITT 1: Zuerst wird das Gerät, an welches die Spritze mit dem Botulinumtoxin angeschlossen ist, in den Analkanal des Patienten bis zur gewünschten Tiefe eingeführt.

SCHRITT 2: Das Gerät wird mit einer Hand in einer stabilen Stellung fixiert und der Knopf mit dem Daumen derselben Hand gedrückt. Mit der anderen Hand wird der Drehknopf im Uhrzeigersinn gedreht, um die Nadeln auszufahren.

SCHRITT 3: Die Hand, die den Drehknopf betätigt hat, wird nun zum Injizieren des Medikaments verwendet, nachdem sich der Anwender durch Zurückziehen des Kolbens vergewissert hat, dass die Nadeln sich nicht in einem Blutgefäß befinden.

SCHRITT 4: Der Knopf wird erneut mit dem Daumen der Hand gedrückt, die das Gerät festhält, während die andere Hand den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn dreht, um die Nadeln einzufahren.

SCHRITT 5: Schließlich kann das Gerät aus dem Analkanal des Patienten entfernt werden.

FISSCURE®

Legal Hersteller
Doc-Invent SA
Chemin Riant-Pré 40
1010 Lausanne
Zwitzerland

EU-Importeur und – Vertriebs­händler
Fisscure BV
Permekedreef 6
3090 Overijse
België

**BESTELLEN SIE
IHR GERÄT:**



Weitere Informationen zum Produkt oder zur Kontaktaufnahme finden Sie auf unserer Webseite:

www.fisscure.com